



Acesse o manual completo, o guia rápido e demais informações disponíveis do produto

Introdução

Antes de desembalar sua 2096 PP, leia atentamente as informações contidas neste guia, para que sua balança conserve suas características iniciais

e seu perfeito funcionamento com o decorrer do tempo.

Verifique se existem avarias visíveis, como partes rompidas, úmidas,

etc. informando ao responsável a fim de garantir a cobertura de seguro, garantias de fabricante, transportadores, etc.

ATENÇÃO!

A Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda, em conformidade com as exigências do INMETRO, informa:

Conforme Portaria INMETRO nº 366, de 08 de setembro de 2021, os subitens 2.3.1 e 2.3.2, informam que o adquirente desta balança fica obrigado a comunicar imediatamente ao órgão metrológico, sobre a colocação em uso da mesma:

2.3.1 A colocação em uso do instrumento de medição será comunicada pelo seu proprietário, imediatamente,

ao órgão metrológico executor da primeira verificação periódica, constando desta comunicação a designação do proprietário, local e data de instalação.

2.3.2 Todo instrumento de medição novo ou renovado, após sua colocação em uso no local da instalação, estará sujeito a verificação periódica, conforme previsto na regulamentação técnica metrológica aplicável para a categoria do instrumento de medição.

Depois de retirar a balança da embalagem, verifique o conteúdo. Os seguintes itens devem estar inclusos:

- Embalagem e calços;
- Coluna com indicador digital;
- Plataforma de pesagem
- Guia rápido, flyer institucional e certificado de garantia;
- Parafusos para fixação da coluna;
- Conjunto macho e fêmea para fixação da coluna;
- Fonte adaptadora.


Item opcional:

- Cabo de interligação RS-232C;
- Régua Antropométrica.


Instalação

- A sua 2096 PP deve trabalhar numa superfície plana, firme e livre de vibrações, evitando locais sujeitos a correntes de ar que incidam diretamente sob a plataforma de pesagem. As condições de alimentação elétrica, temperatura e umidade relativa do ar devem ser respeitadas conforme as especificadas técnicas contidas deste guia;
- A tomada que alimentará a sua 2096 PP, deve ser do tipo Tripolar, possuir fase, neutro, uma linha de terra, e deverá estar de acordo com as normas do CONMETRO nº11 de 20/12/2006 e norma NBR 14136/2002, que protegem os usuários contra choques elétricos em caso de falha e acidente na rede elétrica;
- Nunca use ou instale sua 2096 PP em áreas classificadas como perigosas, redes elétricas instáveis e não permita a extensões ou conectores tipo T (benjamins).

Versão com régua

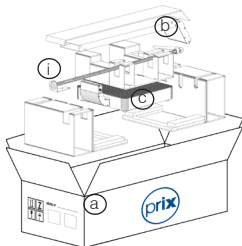

Versão sem régua

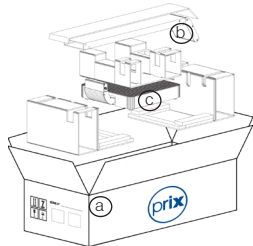


ATENÇÃO!


Não cabe à Toledo do Brasil a regularização das instalações elétricas de seus clientes e tampouco a responsabilidade por danos causados ao equipamento, em decorrência da desobediência a estas instruções. Fica ainda o equipamento sujeito a perda de garantia.

Se estas recomendações não forem obedecidas, poderão ocorrer erros metrológicos e problemas no funcionamento da balança 2096 PP, cabendo ao usuário a total responsabilidade pelos erros incidentes.

Após retirar a embalagem, monte a coluna na plataforma de pesagem conforme as indicações a seguir:
Encaixe a coluna na plataforma de pesagem ("a" e "b"), trave-a utilizando o parafuso de fixação e em seguida parafuse a lateral da coluna ("c" e "d")

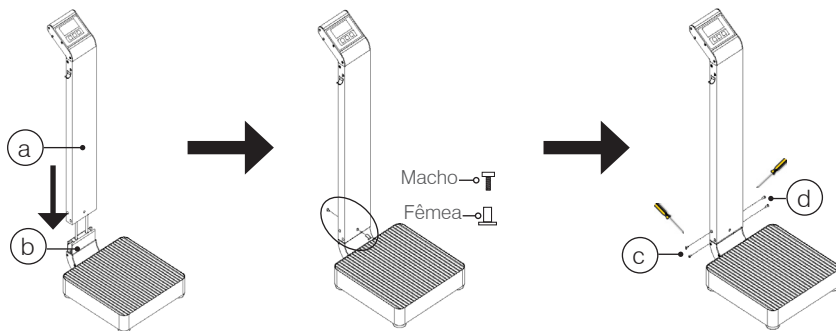

Ligando a sua 2096 PP

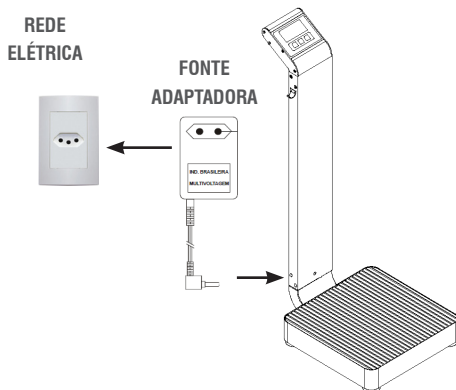

Identificação dos controles

0,00 kg

Líquido Zero

prix

2096PP

DISPLAY DE PESO
Constituído por 6 dígitos, indica o peso bruto ou líquido em quilograma. "PE - - Ab" no display indica peso inferior a faixa de 10% da capacidade de balança. " PE - - Ac" no display indica peso superior a faixa de 10% da capacidade de balança.

INDICADOR DE ZERO
Acende para indicar que não existe peso sobre a plataforma de pesagem e a mesma encontra-se estabilizada.

INDICADOR DE LÍQUIDO
Acende para indicar que um valor de tara foi memorizada e que o peso indicado no display é líquido.

TECLA LIGA/DESLIGA
No modo operação, quando ativada, é utilizada para ligar e desligar a balança. No modo programação, é utilizada para alterar o estado de um parâmetro.

TECLA IMPRIME
No modo operação inicia a transmissão dos dados indicados no display para o computador, caso a balança tenha sido adquirida com esse tipo de comunicação. Caso contrário, é possível adquirir esse kit de forma opcional. No modo programação é utilizada para confirmar o estado de um parâmetro e avançar ao próximo.

TECLA TARA
No modo operação, quando ativada, é utilizada para memorizar um valor de tara. No modo é utilizada para retornar ao parâmetro anterior.

Especificações técnicas

CAPACIDADE DE PESAGEM	200 kg x 50 g	
CONSTRUÇÃO	Coluna e indicador	Alumínio com acabamento em esmalte branco
	Base	Aço carbono SAE 1020
	Plataforma	Aço carbono SAE 1020 com acabamento em esmalte branco e tapete de borracha sobre a plataforma
	Régua Antropométrica	Alumínio com acabamento em esmalte branco
Haste da escala em alumínio		
Apoio da cabeça em plástico ABS branco		
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	Tipo	Fonte adaptadora multivoltagem
	Tensão de entrada	100 a 240 Vca
	Tensão de saída	+ 7,7 Vcc
	Corrente de saída	1 A
	Frequência	50 / 60 Hz
CONSUMO	1,02 a 1,45 W	
DISPLAY	Tipo	LCD - Display de cristal líquido com 6 dígitos e backlight
	Área de visualização	110 mm (L) x 38 mm (A)
RÉGUA ANTROPOMÉTRICA	Escala de 1,05 a 2,01 m	
TEMPERATURA	0° a + 40° C	
UMIDADE DO AR	10% a 95% sem condensação	
DIMENSÕES	Balança	400 mm (L) x 1090 mm (A) x 495 mm (P)
	Plataforma de pesagem	400 mm (L) x 400 mm (P)
PESO	Sem régua	27 kg sem embalagem ou 30 kg embalada
	Com régua	31 kg sem embalagem ou 33 kg embalada
INMETRO	Aprovada pela portaria	236 / 94
	Classe de exatidão	(III)
LIMITES DE INDICAÇÃO	Indicação mínima	1 incremento abaixo de zero
	Indicação máxima	5 incrementos acima da capacidade de pesagem

Recomendações

- Nunca utilize objetos para acionar as teclas. Utilize sempre a ponta dos dedos;
- Nunca remova a fonte adaptadora multivoltagem da tomada, puxando-a pelo cabo. Puxe-a sempre pela fonte e afaste a fonte de superfícies quentes, molhadas / úmidas;
- Mantenha sempre limpa a área que circunda a sua 2096 PP e, antes de efetuar qualquer serviço de limpeza ou manutenção, desligue a sua 2096 PP da rede elétrica;
- Para limpar a sua 2096 PP, utilize um pano seco e macio. Para remover manchas mais difíceis, utilize pano levemente umedecido em água e sabão neutro. Nunca use benzina, thinner, álcool ou outros solventes químicos na limpeza da balança;
- Não rompa o lacre nem abra a sua 2096 PP. Você poderá pôr em risco o funcionamento da sua 2096 PP e perder a Garantia Toledo do

Brasil, além de poder sofrer multa e interdição pelo órgão fiscalizador metrológico - Ipem / Inmetro;

- Caso ocorra algum problema na sua 2096 PP, consulte o manual do usuário, antes de chamar a Assistência Técnica Toledo do Brasil ou rede de Oficinas Técnicas Autorizadas.
- A Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda. possui filiais próprias em todo o país que prestam serviços de alta qualidade de instalação, calibração, manutenção e atualização tecnológica. Além destas filiais, a Toledo do Brasil oferece uma rede de oficinas técnicas autorizadas com peças de reposição originais para atender com rapidez e eficiência, principalmente, aos clientes do mercado varejista. Caso haja alguma dúvida, entre em contato conosco em um dos telefones indicados no final deste guia, que teremos o prazer em lhe ajudar ou indicar a oficina técnica autorizada mais próxima.

ATENÇÃO!

Este guia contém informações básicas para colocação do equipamento em uso. Para mais detalhes de operação, programação, protocolos de comunicação, troca de

bateria e demais informações, consulte o manual do usuário da 2096 PP, disponível no site: www.toledobrasil.com/produtos/manuais

Termo de garantia

A Toledo do Brasil garante seus produtos contra defeitos de fabricação (material e mão de obra) pelo período especificado no certificado de garantia que acompanha o produto, contado a partir da data da Nota Fiscal de venda ao consumidor final, se consideradas

as condições estabelecidas por este manual para defeitos devidamente constatados como sendo de fabricação. Nos prazos de garantia citados no certificado de garantia já estão computados o prazo de garantia legal e o prazo de garantia contratual.

Tanto a constatação dos defeitos, como os reparos necessários serão promovidos pela Toledo do Brasil (matriz ou filial) ou uma OTA - Oficina Técnica Autorizada Toledo do Brasil que se encontre mais próxima do local de instalação do equipamento.

Uso da Garantia

Para efeito de garantia, apresente o Certificado de Garantia devidamente preenchido e a Nota Fiscal de compra do equipamento contendo seu número de série.

A garantia fica automaticamente inválida se:

- O equipamento não for instalado e utilizado conforme as instruções contidas neste manual.
- O equipamento tiver sofrido danos por acidentes ou agentes da natureza, maus tratos, descuido, ligação à rede elétrica imprópria, exposição a agentes químicos e/ou corrosivos, presença de água ou insetos no seu interior, utilização em desacordo as instruções deste manual ou ainda por alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Toledo do Brasil.
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da placa de identificação do equipamento.
- Constatada adulteração ou rasuras no Certificado de Garantia ou espirada a vigência do período de garantia.

A garantia não cobre:

- Despesas com instalação do equipamento realizada pela Toledo do Brasil ou OTA - Oficina Técnica Autorizada Toledo do Brasil.
- Despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para a instalação do equipamento, ou seja, rede elétrica, tomadas, cabos de comunicação, conectores, suportes mecânicos, aterramento, etc.
- Reposição de peças pelo desgaste natural, como teclado, prato de pesagem, painéis, gabinete, bem como a mão de obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas destas ocorrências.
- Equipamentos ou peças que tenham sido danificadas em consequência de acidentes de transporte ou manuseio, amas-samentos, riscos, trincas ou atos e efeitos de catástrofe da natureza.
- Remoção, embalagem, transporte e seguro do equipamento para conserto.

Observações:

- Se ocorrer defeito de fabricação durante o período de garantia, a responsabilidade da Toledo do Brasil será limitada ao fornecimento gratuito do material e do tempo do técnico aplicado no serviço para colocação do produto em operação, desde que o Cliente envie o equipamento à Toledo do Brasil ou pague as horas gastas pelo técnico durante a viagem, bem como as despesas de refeição, estada, quilometragem e pedágio e ainda as despesas de transporte de peças e pesos-padrão, acrescidas dos impostos e taxa de administração.
- No caso de produtos fabricados por terceiros e revendidos pela Toledo do Brasil (PCs, Scanners, Impressoras, CLPs, Etiquetadores e outros), será repassada ao Cliente a garantia do fabricante, cuja data base será a data da fatura para a Toledo do Brasil.
- Não estão incluídas na garantia eventuais visitas solicitadas para limpeza ou ajuste do produto, devido ao desgaste decorrente do uso normal.
- Se o Cliente solicitar a execução de serviços, no período de garantia, fora do horário normal de trabalho da Toledo do Brasil, será cobrada a taxa de serviço extraordinário.
- Em nenhum caso a Toledo do Brasil poderá ser responsabilizada por perda de produtividade ou de dados, danos diretos ou indiretos, reclamações de terceiros, paralisações ou ainda quaisquer outras perdas ou despesas, incluindo lucros cessantes, provenientes do fornecimento. Se, em razão de lei ou acordo, a Toledo

do Brasil vier a ser responsabilizada por danos causados ao Cliente, o limite global de tal responsabilidade será equivalente a no máximo 5% do valor do equipamento, ou da parte do equipamento que tiver causado o dano, à vista das características especiais do fornecimento.

- A Toledo do Brasil não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.
- Peças e/ou acessórios que forem substituídos em garantia serão de propriedade da Toledo do Brasil.
- Eventuais dúvidas quanto às condições de garantia deverão ser tratadas diretamente com a Toledo do Brasil.

Vendas e assistência técnica próprias em todo o Brasil

Araçatuba, SP.....(18) 3303 - 7000
Belém, PA.....(91) 3182 - 8900
Belo Horizonte, MG.....(31) 3326 - 9700
Campinas (Valinhos), SP.....(19) 3829 - 5800
Campo Grande, MS.....(67) 3303 - 9600
Cuiabá, MT.....(65) 3928 - 9400
Curitiba (Pinhais), PR.....(41) 3521 - 8500

Fortaleza, CE.....(85) 3391 - 8100
Goiânia, GO.....(62) 3612 - 8200
Luís Eduardo Magalhães, BA.....(77) 2122 - 0500
Manaus, AM.....(92) 3212 - 8600
Maringá, PR.....(44) 3306 - 8400
Palmas, TO.....(63) 3232 - 5200
Porto Alegre (Canoas), RS.....(51) 3406 - 7500
Recife, PE.....(81) 3878 - 8300

Ribeirão Preto, SP.....(16) 3968 - 4800
Rio de Janeiro, RJ.....(21) 3544-7700
Salvador (Lauro de Freitas), BA.....(71) 3505-9800
Sorriso, MT.....(65) 3928-9400
São José dos Campos, SP.....(12) 3203-8700
São Paulo (São Bernardo do Campo), SP.....(11) 4356-9404
Uberlândia, MG.....(34) 3303-9500
Vitória (Serra), ES.....(27) 3182-9900

toledobrasil.com

Canal de Suporte da Toledo do Brasil: suporte.tecnico@toledobrasil.com

Toledo do Brasil
Indústria de Balanças Ltda.